

# MIRAX-S **AD**

## DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ANTES DE UTILIZAR, REALIZAR UM TESTE NUMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO O PRODUTO.

**MODO SE USAR:** Produto concentrado, a ser diluído antes do uso, na proporção de 1 parte de produto para até 200 partes de água (1:200), 5 mL do produto para 1L de água com tempo de contato de 10 minutos antes de ser utilizada.

• Desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto na diluição de 1:200 deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário. • Artigos não críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Preparar uma solução na proporção 1:200. Aplicar nos artigos ou imergi-los nessa solução, deixando em contato por 10 minutos.

**COMPOSIÇÃO:** Ingrediente ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio (Quaternário de Amônio 5ª Geração) - 10%, Preservante, Sequestrante, Tensoativo não Iônico e Água.

LOTE: \_\_\_\_\_

DILUÍDO NA PROPORÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA DA DILUIÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELA DILUIÇÃO: \_\_\_\_\_

VALIDADE DA DILUIÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANVISA/MS: 3.3286.0033

Utilize acessórios de segurança:   

NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.992.697/0001-85

Aut. Func/MS: 3.03.286-3

**SAC**

**sac@renko.com.br**

**(11)3385-0073**

**renko.com.br**

