



LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Em Ambientes de Saúde





A desinfecção em ambientes e superfícies da área hospitalar e ambientes de saúde.

MIRAX OXY - WIPES é um limpador e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de amônio de 5ª geração para uso em hospitais, laboratórios, clínicas médicas e odontológicas.

Tem ação bactericida e bacteriostático, agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas, nos ambientes e superfícies abaixo indicadas:

AMBIENTES

- Hospitais
- Casas De Repouso
- Clínicas Médicas
- Laboratórios de Análises Clínicas
- Clínicas de Estética
- Clínicas Odontológicas
- Clínicas Veterinárias
- Ambulatórios

SUPERFÍCIES PARA DESCONTAMINAÇÃO

Superfícies fixas

- Pisos, Paredes, Tetos, Portas, Bancadas, Escadas, Janelas, Vidros, Luminárias, Equipamentos, Mobiliários, Colchões, Maçanetas, Macas, Interruptores, Louças Sanitárias, Macas, Incubadoras, Elevadores etc;

Artigos não críticos

- Termômetro Axilar, Estetoscópio, Suporte de Soro, Aparelhos de Pressão, Comadres, Papagaios, Bacias, Cuba Rim, Cadeiras de Banho.

Não utilizar em equipamentos que entram em contato com sangue, mucosas ou tecido vascular.

Instruções de uso:

- Utilize luvas para manipular o produto.
- Retire a tampa do balde e remova o lacre de segurança.
- A seguir, puxe o PANO do centro do rolo e ao recolocar a tampa do balde, puxe-o para poder usá-lo.
- Passe o MIRAX OXY - Wipes sobre a superfície a ser limpa e desinfetada, espalhando a solução existente no PANO para remover a sujeira.
- Após sua utilização, **JOGUE O PANO FORA E COM ELE TODA A SUJEIRA**

Características do Produto

MIRAX OXY - Wipes são panos umedecidos com desinfetante hospitalar

- Não deixa riscos ou resíduos nas superfícies aplicadas;
- Possui agentes especiais de limpeza, que removem com grande facilidade a sujidade.
- Fácil de manipular e sem desperdício;
- Tecido macio e absorvente;
- Não amarela as superfícies;
- Limpa, desinfeta, alveja e desodoriza em uma única operação.

Mecanismo de ação Mirax Oxy - Wipes sobre as bactérias:

Age por oxidação da membrana celular. Causa estresse oxidativo na bactéria, o que dificulta sua reprodução e acaba levando à morte.

EFICÁCIA BACTERICIDA:

RDC Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007

- **Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.**

Diluição | Tempo de contato:
PURO |  **15 Seg.**

BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES:

- **Klebsiella pneumoniae (KPC), Acinetobacter baumannii, Enterococcus spp. resistente à vancomicina (VRE), Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA).**

Diluição | Tempo de contato:
PURO |  **30 Seg.**

EFICÁCIA FUNGICIDA

- **Candida auris, Candida albicans.**

Diluição | Tempo de contato:
PURO |  **30 Seg.**

Laudo Teor de Peróxido de Hidrogênio

Laudo Teor de Quaternário 5ª Geração

Laudo de estabilidade acelerada 126 dias

