

CHEF CLOR S

DESINFETANTE EM GEL CLORADO

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E
ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

Descrição:

Desinfetante clorado concentrado (25.000 ppm) com 2,5% de cloro ativo, com ampla aplicação e alto poder de desinfecção, desenvolvido para as áreas de assistência a saúde, tais como: clínicas médicas e odontológicas, consultórios, ambulatorios e hospitais. Possui alto rendimento e formação de espuma, aderindo facilmente em superfícies inclinadas. Limpa e desinfeta em uma única operação, devido a presença de tensoativos com ação de limpeza. Possui agente anti redepositante que impede que resíduos infectados se depositem novamente, durante a limpeza, sobre a superfície limpa. Eficácia comprovada através de ensaios, conforme RDC nº14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS). Bactérias testadas: *Staphylococcus Aureus*, *Salmonella Choleraesuis*, *Escherichia Coli* e *Pseudomonas Aeruginosa*.

Características do produto:

- Produto 3 em 1: Limpa, desengordura e desinfeta em única operação;
- Alto poder de formação de espuma;
- Boa ação alvejante;
- Produto concentrado;
- Contém tensoativos biodegradáveis;
- Rápida diluição em água;

Indicação de uso:

Em hospitais é indicado para:

- a) *Áreas críticas* como centro cirúrgico, UTI, UTI neonatal, unidade de diálise, unidade de isolamento, unidade de transplante, unidade de queimados, área suja da lavanderia, etc.
- b) *Áreas semicríticas* como enfermarias, ambulatorios, quartos, central de triagem, banheiros, etc.
- c) *Áreas não críticas* como vestiários, recepção, elevadores, etc
- d) *Superfícies fixas* como parede, bancada, piso, tetos, macas, etc
- e) *Artigos não críticos* como suporte de soro, comadres, bacias, papagaios, cuba rim, cadeiras de banho, etc
- f) *Lactários* para desinfecção de mamadeiras, chupetas, utensílios, etc

Não utilizar em superfícies metálicas devido à ação corrosiva do hipoclorito de sódio. Possui amplo espectro anti bacteriano e excelente ação de eliminação de vírus e fungos (mofos, bolor, limo), etc.

Modo de Uso:

Para desinfecção de médio nível ou intermediária, diluir na proporção de 1 parte do produto para até 99 partes de água (1:100), obtendo-se uma solução de 250 ppm de cloro ativo.

Para desinfecção de alto nível: SUPERFÍCIES FIXAS, ARTIGOS E ACESSÓRIOS hospitalares, a diluição recomendada deverá ser de 1:2 (12.500 ppm), ou seja, 500 mL em 1000 mL de água. Deixar um tempo de contato de 10 min. para as superfícies fixas e 30 min. em imersão para artigos e acessórios hospitalares. Enxaguar ou retirar o excesso conforme orientação operacional interna.

Para desinfecção em lactários: 1) Realizar lavagem prévia, utilizando detergente e efetuando ação mecânica; 2) Enxaguar para remover todo residual do produto; 3. Em seguida, diluir CHEF CLOR S em até 1:100; 4. Realizar a imersão dos artigos na solução por 1 hora; 5. Enxaguar.

OBS.: Evitar formação de bolhas de ar no interior de artigos ocos e comprometer a desinfecção.

Dados físico-químicos:



Nova Renko Indústria Ltda.

Rua Miguel Gimenès Alves, 630 – Jd. Santa Izabel - CEP:13.185.490 – Hortolândia – SP - Telefone/SAC: 11 3385-0073
SAC: sac@renko.com.br - <http://www.renko.com.br>

Aparência	Líquido transparente
Cor	Amarelo esverdeado
Odor	Característico
pH, a 25°C	12,00 – 14,00
Porcentagem de ativos, %	2,00 – 3,00
Densidade, g/mL a 25°C	1,050 – 1,080
Inflamabilidade	Não Inflamável

Apresentação:

Produto disponível em frascos de 1L e bombonas de 5L e 20L.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANÇE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. CUIDADO: IRRITANTE PARA OS OLHOS E PELE. NÃO MISTURE COM PRODUTOS A BASE DE AMONÍACO. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. **ATENÇÃO:** Não ingerir, evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância por 15 minutos. Persistindo a irritação, procure auxílio médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rótulo ou embalagem do produto. Não administre nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local bem ventilado. Depois de utilizar esse produto, lave e seque as mãos. Não misturar com outros produtos. Não misture com água na embalagem original.

Cuidados de conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original e fechado. Conserve o produto em local seco ao abrigo do sol. Não utilize a embalagem vazia para outros fins. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Prazo de validade:

6 meses a partir da data de fabricação.